

CLIENTE

ALFASIGMA





Stylegraph

Via Garbagnate, 61

20020 Lainate (MI)

+39 02 9371446

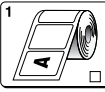
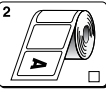
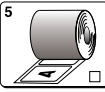
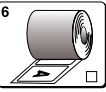
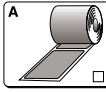
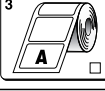
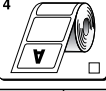
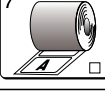
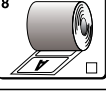
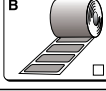
Artwork Approval Signature

Regulatory

Local Marketing

Corporate Marketing

Technical Dept.

CODICE CARTELLINA C. 00109/20		DATA MODIFICA IMPIANTO 08/07/2025		CORPO TESTO: 9 INTERLINEA: 10,5		FONTS Myriad Pro			
ARTICOLO Prospetto		PRODOTTO MEPENTOL LECHE Iib							
<div><input type="checkbox"/> Steso<input type="checkbox"/> Piegato<input type="checkbox"/> Bobina<input type="checkbox"/> Booklet</div> <div><input type="checkbox"/> Con microforatura<input type="checkbox"/> Senza microforatura</div>									
GRAMMATURA CARTA		FORMATO 130 x 201 (piegato 25 x 130)		LAYOUT DI RIFERIMENTO		% DI COPERTURA TESTI/SUPERFICIE		SCALA 1:1	
CODICE ALFASIGMA			CODICE CLIENTE 4.181.07.25			RIF. PRATICA			
SENSO DI SVOLGIMENTO N.				<div><div>1</div><div>2</div><div>5</div><div>6</div><div>A</div><div>3</div><div>4</div><div>7</div><div>8</div><div>B</div></div>					
SOLO PER PROSPETTI IN BOBINA									
COLORI				DATE AND SIGNATURE FOR PRINTING APPROVAL					
P. 506									
				CUSTOMER					

IMPORTANTE! Per ogni comunicazione si prega di considerare sempre l'astuccio aperto e steso, dalla parte stampata e con la linguetta d'incollatura a sinistra. La sequenza delle facciate parte quindi dalla linguetta d'incollatura nell'ordine:

	1	2	3	4
--	---	---	---	---

Edizione

4

5

6

7

8

Data allestimento

30.01.2015

11.10.2016

02.03.2018

11.12.2020

08.07.2025

RIF. LAETUS

MASTER DI RIFERIMENTO

NOTE / RIF. IMPIANTO PRECEDENTE

4.181.12.20

VISTO SI STAMPI

ALFASIGMA

L'impianto stampa non deve assolutamente essere modificato o danneggiato

Bar prints 100mm @ 100%



Prevenção y Tratamiento de Úlceras de la Extremidad Inferior en los estadios iniciales

Prevenção y Tratamiento de Úlceras por Presión de Estadio I y II

MEPENTOL LECHE es una emulsión especialmente formulada para la prevención y tratamiento de úlceras de la extremidad inferior en los estadios iniciales. Desarrollada a partir de la experiencia obtenida con Mepentol en la prevención y tratamiento de úlceras por presión de estadio I y II, MEPENTOL LECHE cuenta con las características necesarias para dar respuesta a los requerimientos más específicos de la prevención y tratamiento de úlceras de la extremidad inferior en los estadios iniciales. Además, su especial formulación en emulsión hidratante permite la utilización de medias compresoras inmediatamente después de su aplicación.

COMPOSICIÓN:

Ácidos grasos hiperoxigenados, *Mimosa tenuiflora*, *Aloe barbadensis*, excipientes. No contiene látex.

INDICACIONES Y PROPIEDADES:

MEPENTOL LECHE está indicado en la prevención y tratamiento de úlceras de la extremidad inferior en los estadios iniciales (venosas, arteriales y pie diabético) y en la prevención y tratamiento de úlceras por presión de estadio I y II. El uso continuado de MEPENTOL LECHE reduce la frecuencia de recidivas, características de las úlceras de la extremidad inferior.

Los Ácidos grasos hiperoxigenados que integran su formulación, obtenidos por un particular proceso de hiperoxigenación: favorecen la renovación de las células epidérmicas mejorando la resistencia de la piel y facilitando la cicatrización; restauran el film hidrolipídico evitando la deshidratación cutánea; crean una barrera antimicrobiana que protege la zona ulcerada de agentes externos y mejoran la microcirculación sanguínea; evitan el daño causado por un aumento de los radicales libres gracias a su actividad antioxidante.

MEPENTOL LECHE contiene además, *Mimosa tenuiflora* y *Aloe barbadensis* que proporcionan un efecto hidratante y lenitivo.

FORMA Y PRESENTACIONES:

MEPENTOL LECHE se comercializa en cuatro presentaciones, en dosificador de PET.

- **MEPENTOL LECHE** emulsión 20 ml
- **MEPENTOL LECHE** emulsión 60 ml
- **MEPENTOL LECHE** emulsión 100 ml
- **MEPENTOL LECHE** emulsión 200 ml

MEPENTOL LECHE se presenta en un envase con cierre hermético para asegurar una correcta conservación del producto. Para obtener la máxima cantidad de producto o en caso de funcionamiento irregular del dosificador, colocar el envase en posición vertical, dar un giro de 180° al dosificador y accionarlo repetidamente hasta la correcta dispensación del producto.

MODO DE EMPLEO:

Prevenção de Úlceras por Presión y Úlceras de la Extremidad Inferior y Tratamiento de Úlceras por Presión de Estadio I: Después de haber efectuado las curas de limpieza habituales, aplicar MEPENTOL LECHE 2 ó 3 veces al día, sobre las zonas de riesgo o afectadas por la úlcera, extendiendo el producto con las yemas de los dedos.

Acompañar el uso de MEPENTOL LECHE de cambios posturales y otras prácticas de prevención y cuidados generales, así como seguir las medidas higiénico-posturales recomendadas, puede evitar la formación de úlceras en la piel.

Tratamiento de Úlceras por Presión de Estadio II y Úlceras de la Extremidad Inferior en los estadios iniciales: Después de haber efectuado las curas de limpieza habituales, aplicar directamente MEPENTOL LECHE sobre la úlcera, o sobre una gasa estéril, que se aplica después sobre la úlcera. Cubrir la úlcera con la ayuda de un vendaje apropiado. Repetir la aplicación 2 ó 3 veces al día hasta la completa cicatrización.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO:

En caso de presentarse excesivo enrojecimiento de la piel se aconseja utilizar Mepentol solución.

Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad a los componentes de MEPENTOL LECHE.

El personal sanitario o cuidador que aplica MEPENTOL LECHE debe adoptar las normas y precauciones mínimas de una estructura sanitaria (por ejemplo el uso de guantes).

Se recuerda además que, el producto:

1. Es de uso externo.
2. Debe mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.
3. No utilizar si el envase está estropeado o manipulado.
4. Conservar por debajo de 30°C.
5. No debe ser utilizado después de la fecha de caducidad.

FABRICANTE:

Medichem, S.r.l. Via Verona, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio. ITALIA
Tel. +39 02.92590281 - Fax +39 02.92148964



DISTRIBUIDOR:

Alfasigma España, S.L. C/ Aribau 195, 4º - 08021 Barcelona. España
Tel. +34 93 415 48 22 - Fax. +34 93 415 37 92

Última revisión: 22 diciembre 2020



4.181.07.25

Alfasigma España, S.L.
C/ Aribau 195, 4º
08021 Barcelona. España